

A woman in a dark brown leather jacket and white shirt is operating an electric stairlift. The lift is a blue and black device with a seat and footrest, mounted on a wooden staircase with a black wrought-iron railing. An elderly man in a grey suit and white shirt is seated in the lift, looking towards the camera. The background is a plain, light-colored wall.

**Elektrische  
Treppensteiger  
für Personen-  
transport**

# Elektr. Treppensteiger für Personentransport

## Basisinformation

So bringen Sie sie rauf.

### Liftkar-PT-Technologie



#### Zwei AUF-AB-Schalter

Es gibt zwei AUF-AB-Schalter, einer links und einer rechts von der Querstange. Optimal für Linkshänder und Rechtshänder




#### Übersichtliches Bedienpult

Alle Funktionen direkt bedienbar: Aus/Einschalten, die Geschwindigkeitseinstellung sowie das Umschalten von Einzelstufenschaltung auf Durchlauf sind alle direkt bedienbar, auch während der Fahrt auf der Treppe.



#### Leichte Modulbauweise

Alle Liftkar-PTs sind einfach in 3 Teile zerlegbar. Das ganze Gerät ist daher leicht zu tragen und leicht zu verstauen. Nehmen Sie Ihren Liftkar-PT einfach mit.

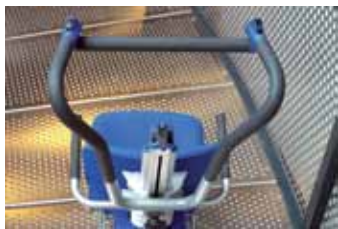

#### Ergonomischer Griff

Der Griff ist leicht verstellbar und konstruiert für Rechts- und Linkshänder. Die stabile Querstange dient zum Abstützen und zum Halten. Rutschsicheres Gummimaterial gibt zusätzlich einen guten Halt.



#### Neigungsanzeiger

Der eingebaute Neigungsschalter hilft Ihnen dabei, das Fahren im Gleichgewicht zu optimieren.

Rot = Stopp (Einschalten blockiert)  
Grün = OK



#### Stabile Radbremsen

Stabile automatische Radbremsen stoppen den Liftkar PT zuverlässig auf der Stufenkante. Die verschleißfreie Bremsfläche auf der Innenseite der Felge gibt einen sicheren Halt und bremst sofort ein.



# Elektr. Treppensteiger für Personentransport

## Inhalt

Wir sorgen für Bewegung.

### ► Inhaltsverzeichnis Elektrische Treppensteiger für Personentransport

---

► Liftkar PT S	76
► Liftkar PT Outdoor	76
► Liftkar PT Fold	76
► Liftkar PT Universal	77
► Liftkar PT Plus	78
► Liftkar PT Adapt	78
► Zubehör	79



► Liftkar PT

Liftkar PT S / Liftkar PT Outdoor

mit eigenem Sitz



- 1 Art.-Nr. M/1543.045703  
PT S 130
- 2 Art.-Nr. M/1543.045704  
PT S 160



- 3 Art.-Nr. M/1543.045705  
PT Outdoor 120
- 4 Art.-Nr. M/1543.045706  
PT Outdoor 150



Liftkar PT Fold

Professionelle Treppensteiger für Krankentransport



- 5 Art.-Nr. M/1543.045711  
PT Fold 130
- 6 Art.-Nr. M/1543.045712  
PT Fold 160



Art.-Nr.	Personen- gewicht kg	Gesamt- gewicht kg	Gesamt- höhe mm	Gesamt- breite mm	Tiefe mm	minimales Treppenpodest m	Preis CHF (exkl. MWST)
1 M/1543.045703	130	30.5	1130	505	675 / 600*	0.8 x 0.9	auf Anfrage
2 M/1543.045704	160	30.5	1130	505	675 / 600*	0.8 x 0.9	auf Anfrage
3 M/1543.045705	120	34.5	1130	505	675 / 600*	0.8 x 0.9	auf Anfrage
4 M/1543.045706	150	34.5	1130	505	675 / 600*	0.8 x 0.9	auf Anfrage
5 M/1543.045711	130	28	1130	482	660 / 405*	0.8 x 0.9	auf Anfrage
6 M/1543.045712	160	28	1130	482	660 / 405*	0.8 x 0.9	auf Anfrage

\* wenn Sitz und Armlehnen eingeklappt

► Liftkar PT

**Liftkar PT Universal**

**Treppensteiger für Profi-Transporter**

Der Liftkar PT Universal ist ein Gerät für jede Art von Selbstfahrer-Rollstühlen bzw. Transport-Rollstühlen. Es ist wirklich einfach, auf Plattform aufzufahren, mit der Rückenklammer zu sichern und loszufahren. Der Liftkar PT Universal ist bereit, Ihre Arbeit auf der Treppe zu übernehmen.

**Auswahl der Modelle**

Vom PT Universal werden 2 Modelle angeboten: 130 und 160, welches jeweils die Gewichtskapazität in Kilogramm für Rollstuhl und Passagier kennzeichnet.

**Das ist Vielseitigkeit**

Handhaben Sie jede Art von Rollstuhl mit dem PT Universal – ungeachtet der Bauart. Die Kopfstütze kann durch einfaches Verschieben auf die jeweilige Person eingestellt werden.



- ❶ Art.-Nr. M/1543.045707  
PT Universal 130
- ❷ Art.-Nr. M/1543.045708  
PT Universal 160

Die Räder des Rollstuhls brauchen nicht abgenommen zu werden. Fahren Sie den Rollstuhl einfach auf die Plattform.



**Sicher und schön**  
Die integrierte Rückenklammer sichert den Rollstuhl während Ihres Transportes.



**Hochklappen, um Platz zu sparen**  
Die Plattform wird hochgeklappt, um Platz zu sparen. Verstauen Sie den leichtgewichtigen Treppensteiger zwischen Ihren anderen Sachen in Ihrem Fahrzeug.



Art.-Nr.	Personen-gewicht kg	Gesamt-gewicht kg	Gesamt-höhe mm	Gesamt-breite mm	Tiefe mm	minimales Treppenpodest m	Preis CHF (exkl. MWST)
❶ M/1543.045707	130	27.6	1130	760 / 395*	385	1.1 x 0.9	auf Anfrage
❷ M/1543.045708	160	27.6	1130	760 / 395*	385	1.1 x 0.9	auf Anfrage

\* Ausleger hochgeklappt

► Liftkar PT



**Schritt 1**  
Fahren Sie mit dem Liftkar PT unter den Rollstuhl und rasten Sie in die Halterungen ein.



**Schritt 2**  
Durch das Hochfahren des Liftkars PT den Rollstuhl anheben.



**Schritt 3**  
Entfernen Sie die Räder vom Rollstuhl.



**Schritt 4**  
Stecken Sie die Räder in die dafür vorgesehenen Bohrungen (nur für PT Plus) und los geht's!

**Liftkar PT Plus**

Treppensteiger zum Anbauen

**Wird mit eigenem Rollstuhl geliefert**

Mit diesem leichtgewichtigen Selbstfahrer-Rollstuhl, bereits ausgestattet mit Adaptern, die für die Inbetriebnahme mit dem Liftkar PT notwendig sind, sind Sie in kürzester Zeit fahrbereit.



① Art.-Nr. M/1543.045709  
PT Plus 115

**Liftkar PT Adapt**

**Mobilität über alles**

Mit dem zusammenlegbaren Rollstuhl des PT Plus und den 3 Teilen des zerlegten Liftkars passt das komplette Set in den Kofferraum.

**Nun sind Sie beweglich**

Bei keinem der Modelle (Plus oder Adapt) ist es notwendig, für die weitere Benutzung als Rollstuhl den Treppensteiger abzunehmen. Heben Sie den Liftkar PT hoch, stecken Sie die Rollstuhlräder wieder an den Rollstuhl und er kann wie gewöhnlich benutzt werden (mit dem Treppensteiger).



② Art.-Nr. M/1543.045701  
PT Adapt 130  
③ Art.-Nr. M/1543.045702  
PT Adapt 160

Art.-Nr.	Personengewicht kg	Gesamtgewicht kg	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Tiefe mm	minimales Treppenpodest m	Preis CHF (exkl. MWST)
① M/1543.045709	115	23.5	1130	430	385	0.9 x 0.9	auf Anfrage
② M/1543.045701	130	24.7	1130	482	385	0.9 x 0.9	auf Anfrage
③ M/1543.045702	160	24.7	1130	482	385	0.9 x 0.9	auf Anfrage

► Liftkar PT

Zubehör



1 Art.-Nr. E/1543.045141  
Netzladegerät



2 Art.-Nr. E/1543.945120  
KfZ-Ladegerät



3 Art.-Nr. E/1543.004150  
Schnellwechselakku



4 Art.-Nr. E/1543.945101  
Kopfstütze



5 Art.-Nr. E/1543.045142  
Ladegerät-Adapter  
Stecker UK



6 Art.-Nr. E/1543.045143  
Ladegerät-Adapter  
Stecker USA



7 Art.-Nr. E/1543.045144  
Ladegerät-Adapter  
Stecker AUS

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF (exkl. MWST)
1 E/1543.045141	Netzladegerät	auf Anfrage
2 E/1543.945120	KfZ-Ladegerät	auf Anfrage
3 E/1543.004150	Schnellwechselakku	auf Anfrage
4 E/1543.945101	Kopfstütze	auf Anfrage
5 E/1543.045142	Ladegerät-Adapter, Stecker UK	auf Anfrage
6 E/1543.045143	Ladegerät-Adapter, Stecker USA	auf Anfrage
7 E/1543.045144	Ladegerät-Adapter, Stecker AUS	auf Anfrage

